

POP
N. 32

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO APARELHO NEGATOSCÓPIO

1. OBJETIVOS

- Remover as sujidades e resíduos para prevenção e controle de infecção cruzada ao paciente, docentes, acadêmicos e técnico administrativos.

2. LOCAL DE APLICAÇÃO

- Clínica I; Clínica II; Clínica Integrada; Centro Cirúrgico; Pronto Atendimento e Radiologia.

3. RESPONSÁVEIS

- Técnicos administrativos e equipe de higienização e conservação do ambiente.

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Equipamentos de proteção individual (EPIs) – máscara, gorro, óculos de proteção, luva multiuso de limpeza, avental ou pijama cirúrgico;
- Sabão líquido;
- Solução diluída de ácido peracético;
- Pano limpo.

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- Higienização das mãos (**POP n. 01**);
- Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs;
- Certificar-se que o aparelho está desligado da tomada;
- Friccionar as superfícies do aparelho, com pano limpo umedecido com solução de sabão líquido e água;
- Enxaguar com pano limpo umedecido com água para remoção de sujidades e resíduos do sabão líquido;
- Secar completamente toda a superfície com pano limpo e seco;
- Friccionar pano embebido em solução diluída de ácido peracético na superfície do aparelho (**POP n. 26**);
- Lavar e secar as luvas utilizadas para a realização da limpeza e desinfecção e posterior remoção das mesmas;
- Realizar a higienização das mãos (**POP n. 01**).

6. FATORES DE RISCO

- Remoção deficiente dos resíduos de matéria orgânica resultando em dificuldade da ação do agente desinfetante.

7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Brasil, Ministério da Saúde. Controle de Infecções e a Prática Odontológica em Tempos de AIDS – Manual de Condutas, 2000.
- Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria n. 485 de 11 de novembro de 2005. Aprova a norma regulamentadora n. 32 sobre a segurança e saúde no trabalho e estabelecimentos de saúde.
- Conselho Regional de Odontologia - CRO. Controle de Infecção e Biossegurança – procedimento operacional padrão. Paraná, 2012.
- Orientações do fabricante do manual técnico do equipamento.